



Микробиологический анализатор BD Phoenix M50

Система для быстрой идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам клинически значимых микроорганизмов

Возможности:

- **Идентификация микроорганизмов (ID)** основана на одновременном использовании 45 хромогенных и флуорогенных субстратов
- **Определение чувствительности к антимикробным препаратам (AST):** панели могут содержать до 84 лунок с актуальными препаратами для AST
- **Определение минимальной ингибирующей концентрации (МИК):** от 3 до 8 серийных разведений антимикробных препаратов для AST
- **Автоматическое определение маркеров устойчивости** для грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (ESBL, VRE, MRSA и пр.)
- **Экспертная система BDХpert** для поддержки пользователей
- **Доступные форматы панелей:** только ID, только AST, комбинированные (ID/AST)



Микробиологические анализаторы



Phoenix M50

2 Phoenix M50

Phoenix M50 / Bactec FX40

Количество панелей / флаконов		50 панелей	100 панелей	50 панелей / 40 флаконов
Кат. номер	Описание			
443624	Анализатор микробиологический BD Phoenix M50, с принадлежностями	1	2	1
443625	Стартовый набор BD Phoenix M50 (PHOENIX M50 STARTER KIT, 443625)	1	1	1
440910	Нефелометр микробиологический BD PhoenixSpec Nephelometer с принадлежностями	1	1	1
441951	Комплект калибраторов для нефелометра BD PhoenixSpec (BD PhoenixSpec Nephelometer Calibrators Kit)	1	1	1
448984	Термометр (THERMOMETER PANEL, 448984)	1	2	1
442296	Анализатор бактериологический BD BACTEC FX40	–	–	1
442299	Установочный набор FX40	–	–	1
445872	Пробирка контроля температуры	–	–	1
443873	Набор для монтажа BD Bactec FX40 к BD Phoenix M50 (ADAPTER PLATE FX40 TO PHX50 SPARE, 443873)	–	–	1
443910	Набор для монтажа дополнительного модуля BD Phoenix M50 (KIT STACKING PHX50, 443910)	–	1	–

Реагенты для проведения исследований

Кат. номер	Описание	Количество
Необходимые реагенты		
246001	Реагент для идентификации микроорганизмов (BD Phoenix ID Broth)	100 шт. x 4.5 мл
246003	Реагент для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (BD Phoenix AST Broth)	10 шт. x 8 мл
246004	Реагент-индикатор для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (BD Phoenix AST Indicator)	10 шт. x 6 мл
246007	Реагент для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам (BD Phoenix AST-S Broth)	10 шт. x 8 мл
246009	Реагент-индикатор для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам (BD Phoenix AST-S Indicator)	10 шт. x 6 мл
Панели BD Phoenix для идентификации микроорганизмов		
448007	Реагенты на панели, для идентификации грам-негативных микроорганизмов (BD Phoenix NID)	25 панелей
448008	Реагенты на панели, для идентификации грам-позитивных микроорганизмов (BD Phoenix PID)	25 панелей
448316	Реагенты на панели для идентификации дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов (BD Phoenix YEAST ID)	25 панелей
Панели BD Phoenix для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам		
449046	Реагенты на панели для исследования чувствительности грамотрицательных микроорганизмов к антибиотикам (BD Phoenix NMIC)	25 панелей
449055	Реагенты на панели для исследования чувствительности грамположительных микроорганизмов к антибиотикам (BD Phoenix PMIC)	25 панелей
449052	Реагенты на панели для исследования чувствительности возбудителей мочевых болезней к антибиотикам (BD Phoenix UNMIC)	25 панелей
Панели BD Phoenix с расширенным спектром антибиотиков		
449056	Реагенты на панели для исследования чувствительности грамотрицательных микроорганизмов к антибиотикам (BD Phoenix NMIC)	25 панелей
449009	Реагенты на панели для исследования чувствительности грамположительных микроорганизмов к антибиотикам (BD Phoenix PMIC)	25 панелей
449025	Реагенты на панели для исследования чувствительности грамотрицательных микроорганизмов к антибиотикам (BD Phoenix NMIC)	25 панелей
Комбинированные панели BD Phoenix для идентификации и ОЧА микроорганизмов		
449044	Реагенты на панели, для идентификации грам-негативных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам (BD Phoenix NMIC/ID)	25 панелей
449057	Реагенты на панели, для идентификации грам-позитивных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам (BD Phoenix PMIC/ID)	25 панелей
448785	Реагенты на панели для идентификации стрептококков и их чувствительности к антибиотикам (BD Phoenix SMIC/ID)	25 панелей
449053	Реагенты на панели, для идентификации возбудителей мочевых инфекций и их чувствительности к антибиотикам (BD Phoenix UNMIC/ID)	25 панелей

Данные медицинские изделия зарегистрированы на территории РФ в РУ № РЗН 2016/4669 от 11 апреля 2017 года "Анализатор микробиологический BD Phoenix варианты исполнения: BD Phoenix 100, BD Phoenix M50, с принадлежностями", РУ № ФСЗ 2009/03983 от 9 июня 2021 года «Реагенты in vitro для анализатора микробиологического "ФЕНИКС 100" (PHOENIX 100)», РУ № ФСЗ 05166 от 16 сентября 2019 "Анализатор бактериологический BD BACTEC, с принадлежностями". Для информирования специалистов здравоохранения. Не для передачи пациентам.

Представительство компании «Бектон Дикинсон Б.В.» (Нидерланды):
127051, Россия, Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 24/27. БЦ Мосэнка Плаза, 2 этаж
Тел.: +7 (495) 775 85 82; E-mail: idscis@bd.com

bd.com/ru

