

# Сводный каталог по преаналитическим системам для анализа газов крови, электролитов, метаболитов

КАТАЛОЖНЫЙ  
НОМЕР

364393




ОПИСАНИЕ

Набор BD Preset: шприц Luer Lok 3,0 мл, защищенная игла BD Eclipse 25G, крышка BD Hemogard  
В уп./100 шт.

КОММЕНТАРИЙ

Самозаполняющийся шприц с иглой для забора артериальных проб.


**1** Пунктировать артерию.

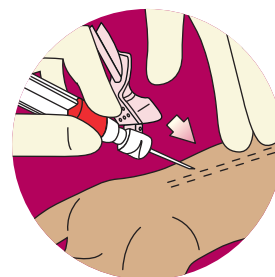

**2** Набрать артериальную кровь в шприц Luer Lok методом самозаполнения.

ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ

**3** Надеть колпачок BD Eclipse.

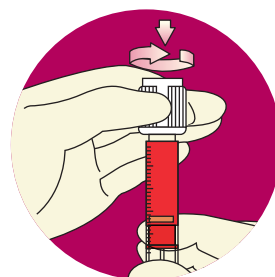

**4** Перемешать пробу крови, вращая шприц между ладонями не менее 5-6 раз.



**5** Срочно доставить к месту исследования.

КАТАЛОЖНЫЙ  
НОМЕР

05.1146.020



ОПИСАНИЕ

S-Monovette®  
(1 мл (66x11 мм), кальций сбалансированный литий-гепарин, инд.уп.)  
В уп./100 шт.

КОММЕНТАРИЙ

Шприц для забора венозных проб.

ПРЕАНАЛИТИ-  
ЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ

**1** Снимите оранжевый защитный колпачок с наконечника шприца S-Monovette® для газов крови.



**2** Подсоедините шприц S-Monovette® для газов крови к катетеру.



**3** Наберите пробу крови медленно вытягивая шток поршня.



**4** Отсоедините шприц от катетера.

**5** Удерживайте шприц S-Monovette® вертикально, наконечником вверх.

**6** Приложите стерильную салфетку к наконечнику шприца S-Monovette® и надавливая на шток поршня вытесните воздух.



**7** Наденьте оранжевый защитный колпачок на наконечник шприца S-Monovette® для газов крови.



**8** Перемешайте пробу крови сразу после взятия, вращая шприц S-Monovette® для газов крови между ладонями.



**9** Срочно доставьте пробу к месту исследования.



ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН»  
Россия, 117420, г. Москва,  
ул. Намёткина, д. 8, стр. 1,  
этаж 4, офис 414

Тел./факс: +7 (495) 925-56-75  
e-mail: galen@galen.ru  
www.galen.ru

Телефон горячей линии поддержки пользователей  
(звонок бесплатный на всей территории РФ)  
8 (800) 250-56-75